


Anleitung zur Aufbereitung von Medizinprodukten

Vorbereitung

Desinfizieren Sie Ihre Hände und legen Sie geeignete Schutzkleidung (PSA) an.

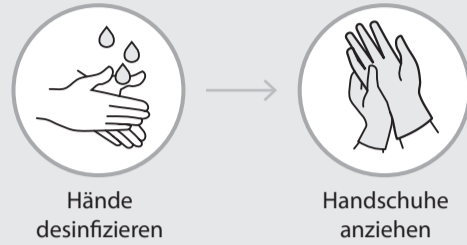

1. Reinigung

Öffnen Sie die Dose mit den **gigasept® powerSET3 cleaning wipes**, entnehmen Sie ein Tuch und schließen Sie die Dose wieder. Falten Sie das Tuch auseinander.

Reinigen Sie das Medizinprodukt, indem Sie es gründlich mit rotierenden und festen Bewegungen abwischen. Wischen Sie das Medizinprodukt von proximal nach distal ab, bis keine Verschmutzungen mehr erkennbar sind und alle Flächen einen leichten Feuchtigkeitsfilm aufweisen. Achten Sie dabei besonders auf Fugen und Kanten.

Entsorgen Sie das Tuch.

Wechseln Sie die Schutzhandschuhe und führen Sie eine Händedesinfektion durch.



2. Desinfektion

Öffnen Sie die Dose mit den **gigasept® powerSET3 disinfection wipes**, entnehmen Sie ein Tuch und schließen Sie die Dose wieder. Falten Sie das Tuch auseinander.

Wischen Sie das Medizinprodukt unter besonderer Berücksichtigung von Fugen und Kanten von proximal nach distal ab. Stellen Sie dabei eine gleichmäßige und vollständige Benetzung aller Areale sicher, so dass alle Flächen einen leichten Feuchtigkeitsfilm aufweisen.

Halten Sie eine Einwirkzeit von **5 Minuten** ein.

Entsorgen Sie das Tuch.




3. Nachreinigung

Öffnen Sie die Verpackung eines **gigasept® powerSET3 rinsing wipes** an der gekennzeichneten Stelle. Entnehmen und entfalten Sie das Tuch.

Wischen Sie das gesamte Medizinprodukt ab, bis alle Flächen vollständig benetzt und mögliche Rückstände entfernt sind.

Entsorgen Sie das Tuch.

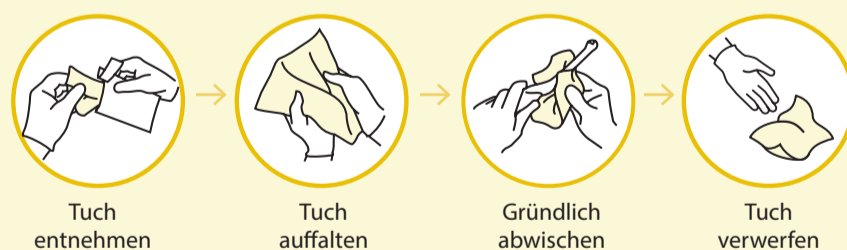

Nachbereitung

Legen Sie die PSA ab und desinfizieren Sie Ihre Hände. Führen Sie die Dokumentation im Handbuch durch.



Schauen Sie sich hier das Video an:

